


EMTRAC SET®

CATHÉTER POUR TRANSFERT DIFFICILE D'EMBRYONS AVEC REPÈRE COULISSANT

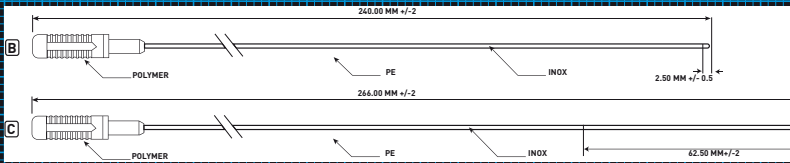

CARACTÉRISTIQUES////////////////////////////////////

- EMTRAC® A (MANCHON BLANC)
Repère coulissant délimitant la hauteur utérine /
Corps solide du cathéter avec une extrémité plus souple permettant d'utiliser l'EMTRAC®A dans la majorité des transferts /
Repère bleu à 6 et 7 cm de l'extrémité distale /
- EMTRAC® B (MANCHON BLEU)
Mandrin flexible pour rigidifier et préformer l'EMTRAC® A /
Tuyau flexible dépassant légèrement l'extrémité distale de l'EMTRAC®A pour faciliter le passage du col /
- EMTRAC® C (MANCHON ROSE)
Cathéter de transfert avec guide /
Une marque sur le cathéter indique quand l'EMTRAC® C a rejoint l'extrémité de l'EMTRAC® A /

TYPE

- CATHÉTER AVEC GUIDE

TUBE ID 1,30 mm
TUBE OO 1,60 mm

- MANDRIN

TUBE ID 0,70 mm
TUBE OO 1,00 mm

- CATHÉTER DE TRANSFERT

TUBE OO 1,00 mm
TUBE ID 0,50 mm

Réf.4219 A

+/- 0,050

+/- 0,050

Réf.4219 B

+/- 0,050

+/- 0,050

Réf.4219 C

+/- 0,050

+/- 0,020

MODE D'UTILISATION

- Repère coulissant placé au préalable selon la hauteur utérine,
- Introduire l'EMTRAC® A muni du mandrin (EMTRAC® B),
- Retirer le mandrin quand l'EMTRAC® A est placé selon le repère,
- Introduire le cathéter de transfert,
- Déposer les embryons,
- Retirer le Set et vérifier que tous les embryons ont été expulsés.

STÉRILISATION

Stérilisé aux rayons Gamma

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Boîte de 25 unités

Réf.4219SET

Également disponible :

Emtrac Set "ECHOGENE"

Réf.4219SET-0

Boîte de 25 unités