


**#4551 FAS**

Aiguille de ponction de follicules

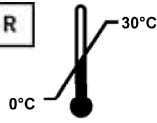

Informations produit importantes - Lire attentivement avant usage.

**Jetable – jeter après usage unique.**

**La réutilisation peut causer des infections sexuellement transmissibles**

**Avertissement : La loi fédérale (Etats-Unis) limite l'utilisation de cet instrument à un médecin.**

**Stérile : sauf si la poche est endommagée ou ouverte.**

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

Récolte transvaginale d'ovocytes des follicules pour fécondation in-vitro et injection de sperme intracytoplasmique.

**CONTRE-INDICATIONS :**

Ne pas utiliser en présence d'une infection cervicale (chronique).

Ne pas utiliser en présence ou après une maladie pelvienne inflammatoire récente.

Ne pas utiliser pour le placement d'ovocytes fécondés dans la trompe de Fallope.

**AVERTISSEMENTS :**

Veuillez-vous référer à la littérature médicale publiée avant d'exécuter cette procédure.

**PRECAUTIONS :**

L'instrument ne doit en aucun cas être forcé si une résistance digitale est ressentie.

Si le passage de la #4551 Fas n'est pas facilement réalisable, l'instrument ne devrait pas être forcé.

La Fas ne devrait être utilisée que par des professionnels de la santé

**EFFETS INDESIRABLES :**

Aucun effet indésirable associé avec l'usage de la #4551 Fas n'a été rapporté. Toutefois, comme avec tout instrument invasif, on peut s'attendre à une contraction et des saignements légers. Dans chaque cas, l'instruction d'utilisation devrait être suivie ; prendre note des contre-indications, avertissements et précautions.

**Fabriqué par :**

Gynetics Medical Products N.V.,  
Rembert Dodoensstraat 51  
3920 Lommel, Belgique

**DELIVRE SOUS :**

#4551 FAS

**EMBALLAGE :**

2 boîtes de 15/25/20 instruments jetables emballés individuellement et stériles.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

1. La patiente étant en position gynécologique dorsale, exposer le col de l'utérus pour le visualiser avec un spéculum vaginal.
2. Nettoyer l'aiguille avant de l'insérer suivant votre protocole standard.
3. Raccorder l'aiguille à la pompe
4. Insérer l'aiguille suivant votre protocole standard à l'aide d'un guidage échographique pour localiser les follicules.
5. Aspirer (et purger) les ovocytes des follicules et collecter les ovocytes dans une fiole (non fourni avec la #4551 Fas).
6. Retirer la #4551 Fas de l'utérus et le jeter.
7. Laisser la patiente se reposer.