



# SwimCount™

SPERM QUALITY TEST

Préservatif sans spermicide

Mettez le préservatif avant que le rapport sexuel commence et assurez-vous qu'il reste en place pendant l'ensemble de la relation sexuelle. S'il se détache, arrêtez et mettez un nouveau préservatif. Ne pas utiliser tout type de lubrifiants, le préservatif doit être utilisé tel quel.

1. Ouvrez délicatement l'emballage du préservatif, en évitant d'endommager le préservatif avec vos ongles, vos bijoux etc.




2. Vérifiez que le préservatif est bien enroulé vers l'extérieur.



3. Placez le préservatif enroulé sur la tête du pénis en érection et pincez l'air du bout du préservatif.




6. Déroulez le préservatif jusqu'au bout du pénis.

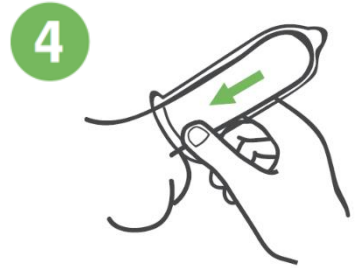
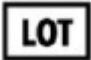







4. Lorsque l'éjaculation est terminée, retirez délicatement le préservatif

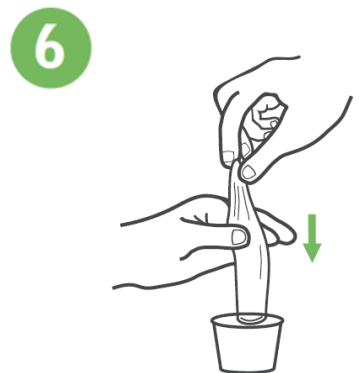

5. Videz l'éjaculat par l'ouverture du préservatif SwimCount en pressant le sperme avec vos doigts



| Symbole                                                                             | Titre                                         | Explication                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | Utiliser avant                                | Utiliser avant la date inscrite sur l'emballage                           |
|    | Lot numéro                                    | Le numéro de lot est inscrit sur l'emballage                              |
|    | Matière                                       | Le latex peut causer des allergies                                        |
|    | Ne pas réutiliser                             |                                                                           |
|    | Si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser |                                                                           |
|  | Garder                                        | Garder dans un endroit sec à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur |
|  | Notice d'utilisation                          |                                                                           |